


Vblock[®]

AGO PER BLOCCO PARACERVICALE UTERINO


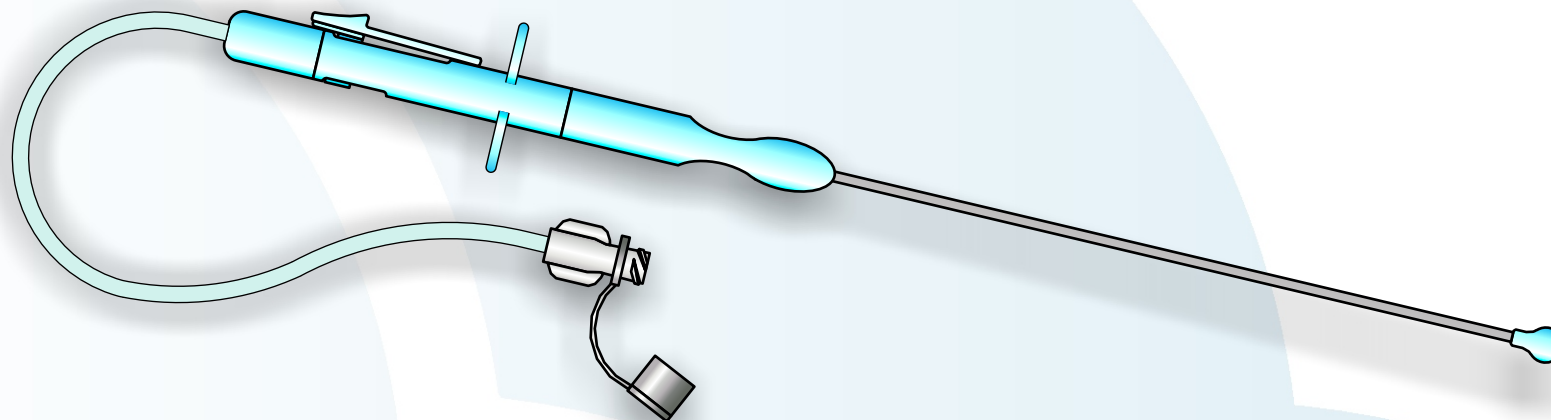


Il dispositivo è stato studiato e realizzato per l'esecuzione semplice, sicura, affidabile ed efficace del blocco paracervicale uterino.

E' essenzialmente costituito da:

- Impugnatura alla cui estremità prossimale trova posto un meccanismo a slitta per la fuoriuscita precisa e sicura dell'ago; la fuoriuscita completa dell'ago viene segnalata dalla comparsa di un marker rosso (questo marker è nascosto dalla slitta allorchè la stessa si trova in posizione di riposo); la retrazione dell'ago viene effettuata azionando l'apposito tasto collocato in posizione opposta alla slitta.
- Cannula in acciaio all'interno della quale trova posto l'ago per l'esecuzione della procedura. L'estremità distale di tale cannula termina con una protezione sferoidale la cui funzione è quella di essere punto di contatto e di fermo, atraumatico, con il fornice vaginale;
- Ago da 20 G a punta obliqua. La fuoriuscita dell'ago dalla sferoide terminale (comparsa del marker rosso) è di 4 mm;
- Prolunga in PVC flessibile, antikinking, lunga 200 mm, terminante con connessione Luer lock femmina munita di tappino.
- Lunghezza totale del dispositivo, esclusa la prolunga in PVC, 270 mm.

Sterile e monouso

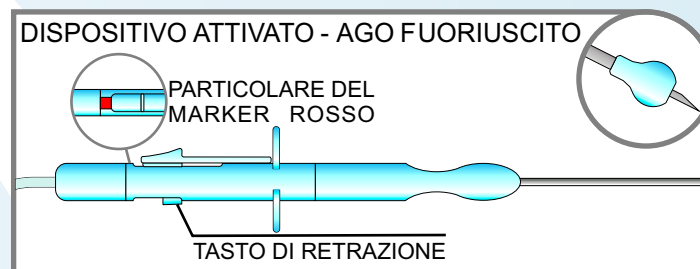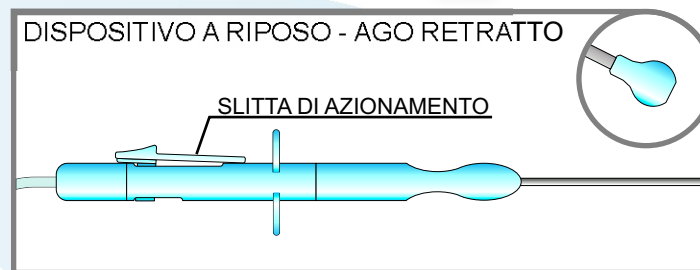

Codice

Quantità per confezione

2-PB02N

10

