

VICTO

Adjustable Artificial Sphincter

BRINGING THE CONCEPT OF THE
ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER
TO **THE NEXT LEVEL**

- ◆ Disponibili due configurazioni per adattarsi ad ogni condizione del tratto urinario del paziente
- ◆ Sistema di regolazione minimamente invasivo



La struttura dell'uretra e la risposta del pavimento pelvico variano da paziente a paziente.

Lo Sfintere Urinario Artificiale (AUS) è stato riconosciuto come il Gold Standard nel trattamento chirurgico dell'incontinenza urinaria da sforzo maschile. Il concetto originale alla base dell'AUS, però, ha fallito nell'adattamento del dispositivo alle varie condizioni dell'uretra e del pavimento pelvico. Noi abbiamo compreso che ogni paziente necessita di un trattamento che sia quanto più possibile personalizzato. Il risultato è VICTO Adjustable Artificial Sphincter, offerto in due configurazioni:



VICTO



VICTO+

VICTO e VICTO+ sono due sfinteri urinari artificiali regolabili progettati per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo nel maschio.

Tecnologia e caratteristiche fanno sì che VICTO e VICTO+ siano gli AUS più evoluti sul mercato:

SISTEMA DI REGOLAZIONE MINI-INVASIVO

Entrambe le configurazioni di VICTO sono dotate di un sistema di regolazione che permette di variare la pressione del dispositivo già impiantato in modo semplice e illimitatamente. Questa procedura può essere eseguita in regime ambulatoriale.



DESIGN ORIGINALE DELLA POMPA

La pompa di VICTO e VICTO+, fatta in morbido silicone, e con una forma facile da palpare, può essere azionata dal paziente con grande facilità.

DISPOSITIVO PRECONNESSO

VICTO e VICTO+ sono forniti con i componenti preconnessi e sono pronti per essere riempiti e impiantati.



DISEGNO CIRCOLARE DELLA CUFFIA

Pressione omogenea intorno all'uretra.

CUFFIE DI DIVERSE MISURE

Per massimizzare le prestazioni del dispositivo e ridurre al minimo il rischio di erosione, è necessario fare affidamento su di una cuffia che eserciti una pressione uniforme attorno all'uretra. Sulla base di ciò, VICTO e VICTO+ offrono quattro dimensioni di cuffia per il miglior adattamento all'anatomia del paziente:



VICTO



- ◆ Impianto semplice.
- ◆ Quantità minima di materiale estraneo.

La quantità di materiale estraneo impiantato dovrebbe essere ridotta al minimo e la configurazione a palloncino singolo è perfetta per pazienti con:

A Un pavimento pelvico intatto e funzionale
(capacità di interrompere la minzione)

B Tessuto uretrale forte e vitale
(ridotta presenza di tessuto cicatriziale)



VICTO+

- Strutture pelviche danneggiate richiedono un aumento di pressione in situazioni di sforzo
- Una pressione occlusiva elevata e costante aumenta il rischio di complicazioni
- VICTO+ esercita la più bassa pressione occlusiva efficace mentre aumenta la pressione nel sistema in situazioni di sforzo (auto-regolazione intelligente della pressione)




Una pressione occlusiva elevata e costante, esercitata specialmente su strutture del pavimento pelvico danneggiate in modo esteso, viene considerata quale principale causa di complicazioni nel tempo.

I pazienti con un pavimento pelvico disfunzionale non hanno la capacità di interrompere il flusso minzionale e necessitano, dunque, di un'incremento di pressione nella cuffia per mantenere chiusa l'uretra in situazioni di sforzo.

VICTO+ è l'indicazione perfetta per questa tipologia di pazienti perché è dotato di un palloncino extra che provvede ad aumentare la pressione della cuffia automaticamente in condizioni di sforzo, trasmettendo alla stessa l'incremento della pressione addominale.

La combinazione di un sistema di facile regolazione e le caratteristiche originali di risposta dinamica in VICTO+ consentono una pressione basale più bassa e nello stesso tempo mantengono continente in situazioni di sforzo il paziente con un pavimento pelvico disfunzionale. E ciò riduce il rischio di complicazioni.

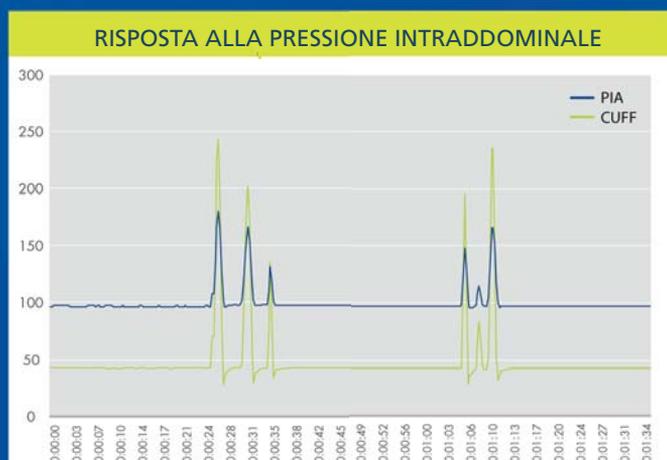

Source: Benchtest Data

VICTO

Adjustable Artificial Sphincter

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Starter Kit*

DESCRIZIONE	DIMENSIONE CUFFIA	CODICE
VICTO STARTER KIT 3.7	3.7	KIT-AUS-37-WS
VICTO STARTER KIT 4.0	4.0	KIT-AUS-40-WS
VICTO STARTER KIT 4.5	4.5	KIT-AUS-45-WS
VICTO STARTER KIT 5.0	5.0	KIT-AUS-50-WS
VICTO+ STARTER KIT 3.7	3.7	KIT-AUS-37
VICTO+ STARTER KIT 4.0	4.0	KIT-AUS-40
VICTO+ STARTER KIT 4.5	4.5	KIT-AUS-45
VICTO+ STARTER KIT 5.0	5.0	KIT-AUS-50

(*) Ogni Starter Kit contiene, nella dimensione richiesta, un sistema AUS vuoto e viene fornito completo di ago e siringa per il suo riempimento.

Kit di Sostituzione

POMPA	CODICE
VICTO / VICTO+ PUMP	KIT-RP-03-10-06
PALLONCINO	CODICE
VICTO / VICTO+ BALLOON	KIT-RB-01
CUFFIA	CODICE
VICTO / VICTO+ CUFF 3.7	KIT-RC-37-10-06
VICTO / VICTO+ CUFF 4.0	KIT-RC-40-10-06
VICTO / VICTO+ CUFF 4.5	KIT-RC-45-10-06
VICTO / VICTO+ CUFF 5.0	KIT-RC-50-10-06

Kit di Accessori

DESCRIZIONE	CODICE
VICTO / VICTO+ ACCESSORIES KIT	KIT-AC-01

Kit di Regolazione

DESCRIZIONE	CODICE
VICTO / VICTO+ ADJUSTMENT KIT	KIT-AD-06

victosphincter.com

Distributore internazionale:

Promedon
— People + Innovation

Distribuito in Italia da:

DIMED

Telefono: +39 011 9723910

E-mail: info@dimedonline.com